



Huldrans väg 9  
371 53 Karlskrona

# FAKTABLAD

## LESO-TÅNGEN (2 längder)

### MATERIAL

**Aluminium** som är röd-eloxerad.

**Rostfri** styrpinne och mekaniskt stopp.

**Cellgummi** på gripytorna med hög friktion.

**Plastslang** över mekaniska stoppet.


**Magnet** med ytbeläggning av zink.



LÄNGD	VIKT	GRIPÖPPNING	RESERVDEL
60 cm	75 g	80 mm	Cellgummibitar
78 cm	100 g	76 mm	levereras i par.

### ANVÄNDNINGSPERFORMANCE

Tänk på att hålla tången så att greppändan blir parallell med underlaget när små föremål, som t.ex. mynt, skall tas upp. Det ger bästa gripförmåga. Se fig. Regel: Om man har tången i höger hand så skall alltid den guldfärgade etiketten vara på samma sida som tummen.

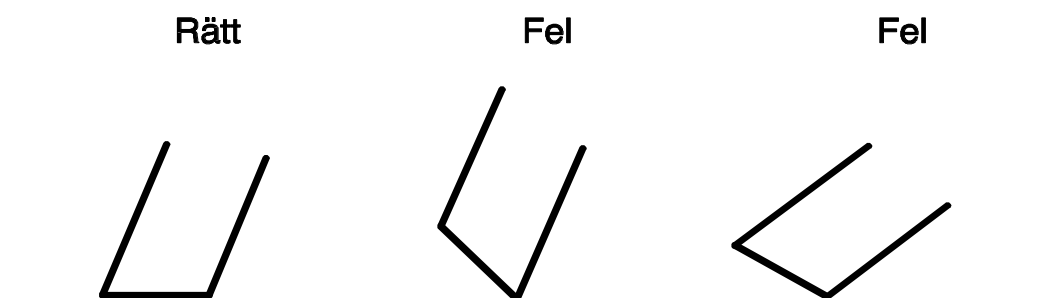

Om t.ex. nålar skall plockas upp, vänd då på tången så att magneten som sitter på den böjda delen riktas mot föremålet.

*OBS! Undvik att ha tången helt i vatten eftersom det då tränger in vid styrpinnen och det är svårt att få ut allt vattnet efteråt. Vill man **endast** använda den i duschen så går det bra. Cellgummibitarna sitter kvar även vid användning i vatten.*

Postadress  
**LESO**  
Huldrans väg 9  
371 53 KARLSKRONA

Tel  
0455-311322

Hemsida  
[www.leso.se](http://www.leso.se)  
E-post  
[info@leso.se](mailto:info@leso.se)