



Huldrans väg 9
371 53 Karlskrona

FAKTABLAD

LESO-TÅNGEN (2 längder)

MATERIAL

Aluminium som är röd-eloxerad.

Rostfri styrpinne och mekaniskt stopp.

Cellgummi på gripytorna med hög friktion.

Plastslang över mekaniska stoppet.

Magnet med ytbeläggning av zink.



LÄNGD	VIKT	GRIPÖPPNING	RESERVDEL
60 cm	75 g	80 mm	Cellgummibitar
77 cm	100 g	76 mm	levereras i par.


ANVÄNDNINGSPERFORMANCE

Tänk på att hålla tången så att greppändan blir parallell med underlaget när små föremål, som t.ex. mynt, skall tas upp. Det ger bästa gripförmåga. Se fig. Regel: Om man har tången i höger hand så skall alltid den guldfärgade etiketten vara på samma sida som tummen.

Rätt

Fel

Fel

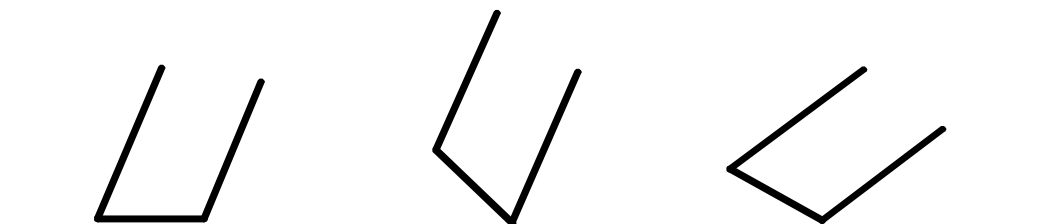

Om t.ex. nålar skall plockas upp, vänd då på tången så att magneten som sitter på den böjda delen riktas mot föremålet.

*OBS! Undvik att ha tången helt i vatten eftersom det då tränger in vid styrpinnen och det är svårt att få ut allt vattnet efteråt. Vill man **endast** använda den i duschen så går det bra. Cellgummibitarna sitter kvar även vid användning i vatten.*

Postadress
LESO
Huldrans väg 9
371 53 KARLSKRONA

Tel
0708 311324

Hemsida: www.leso.se
E-post: info@leso.se